



Oxivir H+

Detergente - desinfectante para superficies duras no porosas en el ámbito sanitario / hospitalario.

Descripción

Diversey Oxivir H+ es un detergente - desinfectante de amplio espectro concentrado para superficies duras no porosas que se encuentren en el ámbito sanitario

Propiedades

- Efectivo frente a un amplio espectro de: bacterias, virus, hongos y levaduras.
- Eficaz detergente
- Sin perfume
- Basado en la innovadora tecnología patentada del Peróxido de Hidrogeno Acelerado

Beneficios

- Probado exhaustivamente siguiendo las normas europeas siendo efectivo frente a múltiples patógenos, incluyendo VIH, VHB, VHC, Gripe aviar, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella entérica, MRSA, VRE y Norovirus.
- Limpia y desinfecta en un solo paso, reduciendo el tiempo de trabajo.
- Excelente rendimiento de limpieza y capacidad desincrustante.
- Elimina la necesidad en un solo paso sin limpieza previa.
- Buen perfil de seguridad para el usuario, sin advertencias de peligro en uso.
- No contiene irritantes respiratorios La formulación de AHP es suave en las superficies y prolonga la vida útil del equipo.
- Buen perfil ambiental. Se descompone en oxígeno y agua.

Modo de empleo

Limpieza y desinfección por spray:


1. Eliminar la suciedad suelta
2. Pulverizar sobre las superficies
3. Limpiar con un paño limpio, previamente mojado con el producto.
4. Dejar la superficie húmeda al menos 5 minutos para efecto bactericida y virucida o 15 minutos para eficacia fungicida.
5. Dejar que seque la superficie.

Limpieza con cubo:

1. Eliminar la suciedad suelta.
2. Aplicar la solución con mopa o bayeta.
3. Dejar la superficie húmeda al menos 5 minutos para efecto bactericida y virucida o 15 minutos para eficacia fungicida.
4. Dejar secar.

Dosificación:

3.5% para lograr cubrir todo el espectro desinfectante (35ml por 1L solución)

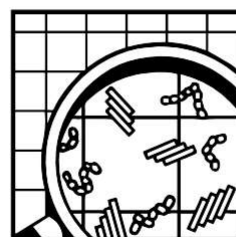

©A.I.S.E.

**Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*



Oxivir H+

Información técnica

Apariencia: Líquido amarillo transparente

pH (producto puro): 0.5

pH (producto diluido): 1.8 +/- 0.5 at 3.5% dilution

Densidad Relativa (20°C): 1.029

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diverseymexico.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto

Importante: No mezclar con otros productos químicos.

Información microbiológica

Eficacia demostrada en cumplimiento de los estándares europeos.

Información medioambiental

Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables, conforme a los requisitos descritos en EU Detergent Regulation, EC 648/2004.